



酸素療法マニュアル

医療ガス安全管理委員会
安全管理室

指示の確認

- ① 指示内容を確認する

準備と設置

- ① 酸素用流量計の接続口に、ピンが 2 本（180° の位置）あること、フローメーター内に異物がないことを確認
- ② 酸素吸入器用加温加湿水の有効期限、開封日、残量、酸素マスクなどの接続部の開放を確認
- ③ 指示された方法（酸素マスク、鼻腔カニューレなど）でセットする
- ④ 酸素用フローメーターに使用するアダプタ・チューブは緑色のものを使用
*第 19 号「安全管理室だより」参照

酸素吸入開始

- ① 供給ルートの外れ、接続のゆるみなどが無いことを確認
- ② 投与開始後のバイタルサイン（SpO₂ など）のチェックをする
- ③ 火気厳禁カードを表示する
- ④ 最後に、指示された方法を再度確認し、指示表にサインをする


（留意点）

- ◇ 機器点検時に、不良破損があれば明記し、速やかに臨床工学部に報告する
- ◇ 4L/分以上は、酸素吸入器用加温加湿水を使用
- ◇ 使用時は“残圧・時間早見表”を下げしておく
- ◇ ボンベは必ず所定の場所に保管
充瓶と空瓶の区別を明確にする
決して単独で立てない（ボンベスタンドなどを使用、もしくは寝かせる）
3MPa ほど残圧を残して返却する
- ◇ ストレッチャー・ベッド移動時、酸素ボンベは足元に設置する




参考写真・表


O₂ マスク

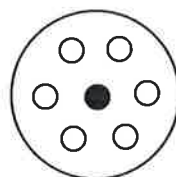

リザーバーマスク

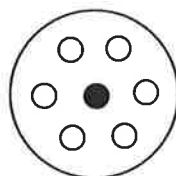

ベンチュリーマスク

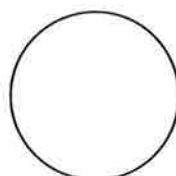

ダライューター色	青	黄	白	緑	桃	赤
流量(LPM)	2	3	4	6	8	12
濃度(%)	24	28	31	35	40	50